

# PRODUKTDATABLAD

## FrostPharma Bioplastik øjendryppeflaske-holder

Dette hjælpemiddel til øjendrypning gør det lettere for dig at anvende øjendråber fra dråbeflasker. Øjendryppe-holderen monteres på flasken med øjendråber, hvorefter den placeres i øjenhulen. Øjendryppeholderen sikrer at dråbeflasken holdes lige over øjet, så dråben kommer ind i øjet, når du trykker på flasken. Se også brugsanvisningen.



- nem at bruge og rengøre
- med hygiejnisk lukkeprop
- lavet af 100% genanvendt bioplast

### Indholdsstoffer/materiale:

<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Nej
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	NA
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	til genbrugsplast
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	plastaffald, papaffald
<b>Bemærkninger:</b>	


# PRODUKTDATABLAD

FrostPharma Bioplastik øjendryppeflaske-holder

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8994001	FrostPharma Bioplastik	øjendryppeflaske-holder, grøn m. lukkeprop		æske a 50 stk	778108

## Brugsanvisning

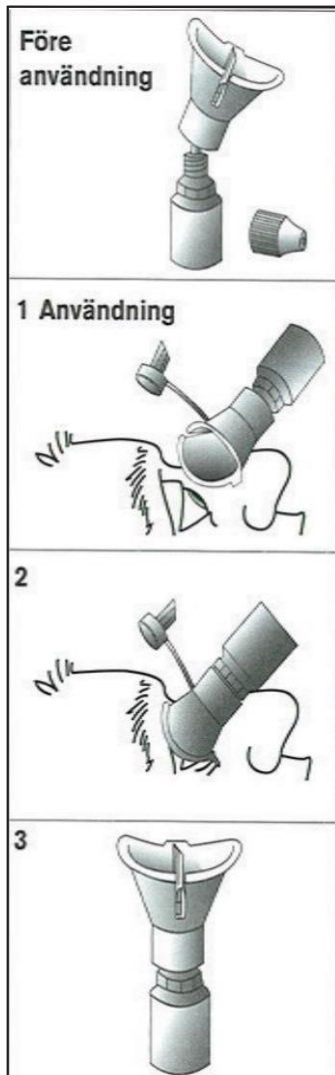

Skrul låget af flasken og placer den på en flad overflade. Pres derefter øjendryppeflaske-holderen ned over flaskehalsen, så den sidder godt fast.

Tag lukkeproppen af og bøj den tilbage. Vip dit hoved tilbage eller læg dig på ryggen. Placer flaskeholderen direkte over øjet med lysspalten opad - uden at røre øjet - og sænk det nederste øjenlåg ved hjælp af støttekanten.

Hold øjet vidt åbent og se op på lysspalten. Tryk derefter let på flasken, så en dråbe presses ud.

Hvis du også har brug for dråber i det andet øje, gentag fra billede 1.

Når drypningen er klar, skal du sætte lukkeproppen på igen.

øjendryppeflaske-holderen skal forblive på øjendråbeflasken i brugsperioden.

Flaskeholderen kan rengøres med opvaskemiddel og varmt vand og tørres.